

STAND UP SEAT

STA-OP STOEL



GEBRUIKERSHANDLEIDING

Model: SX-AF81160S

**LEES VOOR GEBRUIK DEZE INSTRUCTIES DOOR EN
BEWAAR ZE OM ZE INDIEN NODIG LATER NOG EENS TE
KUNNEN RAADPLEGEN.**

Inleiding

Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt, met name het hoofdstuk over veiligheid, zodat u de fauteuil op de juiste manier kunt gebruiken en u optimaal en veilig kunt genieten van uw nieuwe sta-op-stoel.

Bewaar deze handleiding om indien nodig later te kunnen raadplegen.

Inhoudsopgave

Inleiding.....	2
Veiligheidsinstructies.....	3
Let op!	4
Voor het eerste gebruik van de sta-op-stoel.....	4
Montage van de fauteuil	5
Montagestappen	5
Leuning achterover zetten, voetensteun omlaag klappen en fauteuil omhoog zetten	6
Afstandsbediening.....	7
Standen.....	8
Knoppen op afstandsbediening.....	9
Technische specificaties	10

Veiligheidsinstructies

We raden u aan alle instructies zorgvuldig door te lezen voordat u uw sta-op-stoel in gebruik neemt.

- Dit product heeft een automatisch massageprogramma van 15 minuten.
Deze tijd kan worden verkort (minimaal 5 minuten) of verlengd (maximaal 60 minuten). **DE WERKING MAG IN GEEN GEVAL LANGER DUREN DAN 60 MINUTEN.**
- Controleer, voordat u de fauteuil in gebruik neemt, of de netspanning overeenkomt met de spanning van de fauteuil. De fauteuil werkt op een spanning van 12 V, wat volledig veilig is bij normaal gebruik.
- Haal de stekker uit het stopcontact als u de fauteuil niet gebruikt.
- Kinderen mogen de fauteuil alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.
- Stop het gebruik van de fauteuil onmiddellijk in geval van ongemak.
- Ga niet op de fauteuil staan.
- Maak de fauteuil niet schoon met water of chemicaliën. Haal bij het schoonmaken eerst de stekker uit het stopcontact.
- Als het gebruik van deze fauteuil ongemak veroorzaakt, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik. Zorg ervoor dat u het mechanisme niet manipuleert.

Let op!

- Gebruik deze sta-op-stoel met warmtebehandeling met de grootste zorg. De fauteuil genereert warmte tijdens het gebruik.
- Ga niet op de fauteuil staan en gebruik hem niet als opstapje.
- De fauteuil kan door slechts één persoon tegelijk worden gebruikt.
- Gebruik de fauteuil niet als u merkt dat de kabels, schroeven of verankeringen in slechte staat zijn.
- Controleer regelmatig de staat van de kabels, schroeven en verankeringen om zeker te zijn van een optimale werking van de fauteuil.
- Gebruik de fauteuil niet als er een onderdeel ontbreekt of kapot is.
- Deze fauteuil mag alleen worden onderhouden of gerepareerd door een erkend onderhoudsbedrijf.
- De transformator en aansturing van de fauteuil bevinden zich aan de onderkant, in het frame van de fauteuil.

HAAL DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT ALS U DE MASSAGESTOEL NIET GEBRUIKT.

Voor het eerste gebruik van de sta-op-stoel

1. Reinig alle afneembare onderdelen grondig met een vochtige doek. Gebruik nooit schuurmiddelen om de zitting schoon te maken.
2. Plaats de fauteuil op een stabiele, droge ondergrond uit de buurt van warmtebronnen.
3. Zorg ervoor dat het stopcontact voldoende stroom heeft voor de spanning die de fauteuil nodig heeft.

Montage van de fauteuil

- Om het transport te vergemakkelijken, wordt de Stand Up Seat geleverd in losse onderdelen die gemakkelijk in elkaar gezet kunnen worden.
- Pak alle onderdelen uit. Leg ze op de vloer, bij voorkeur op de plek waar u de fauteuil wilt neerzetten. Zorg dat er rondom voldoende ruimte vrij is.
- De montage is heel eenvoudig en kan het beste door twee personen worden gedaan.

Montagestappen

1. Schuif de rugleuning van de zitting voorzichtig op het onderstel.
2. Om de hoofddeunen aan de leuning te bevestigen, plaatst u deze op de zijrails en schuift u ze naar beneden.
3. Sluit de snoeren aan zoals aangegeven in de afbeelding (aansluitingen). Forceer geen verbindingen, want elke stekker past maar op één ander uiteinde (met dezelfde kleur).

Montage

Aansluitingen

Zitting

Rugleuning

U kunt nu direct genieten van de Stand Up Seat!

Leuning achterover zetten, voetensteun omlaag klappen en fauteuil omhoog zetten

- Zowel het achterover zetten van de rugleuning als het opklappen van de voetensteun en het omhoog zetten van de fauteuil gebeurt automatisch.
- U hoeft alleen op de juiste knoppen van de afstandsbediening te drukken (afbeelding A).
- Met de knop [symbool] kunt u de rugleuning achterover zetten. Tegelijkertijd gaat de voetensteun omlaag. Omdat het automatisch gaat, kunt u de knop loslaten wanneer u de gewenste positie hebt bereikt.
- Druk op de knop [symbool] om terug te keren naar de uitgangspositie. Als u de knop ingedrukt houdt, gaat de fauteuil omhoog totdat u bijna rechtop staat.
- Als u deze functie wilt gebruiken vanuit de uitgangspositie, drukt u op de knop [symbool] totdat u de gewenste positie hebt bereikt.
- Druk op de knop [symbool] om terug te keren naar de uitgangspositie.

Afstandsbediening

Massagetijd
Intensiteitsniveau
Massagesnelheid
Type trilling
Automatische / handmatige stand
Functieselectie

Massagegebieden
Warmtefunctie
Massagestand
Aan / uit
Omhoog / omlaag

Standen

Automatisch:

- Het display van de afstandsbediening toont afbeelding B zodra de stekker in het stopcontact wordt gestoken. Het systeem is geprogrammeerd op een automatische massagestand van 15 minuten, tenzij de gebruiker een ander programma heeft gekozen.
- Gebruik de knoppen **Up / Down** om de tijdsduur in te stellen tussen 5 en 60 minuten (instelbaar in intervallen van 5 minuten).
- Door op de knop **On / Off** te drukken zal de fauteuil volgens het ingestelde programma gaan werken en begint de tijd terug te lopen.

Handmatig:

- Druk op de knop **Auto / Manual** om het menu te openen en over te schakelen van de automatische stand naar de handmatige stand. U kunt dan een door uzelf samengestelde massage instellen.
- U kunt zelf bepalen welke mate van trilintensiteit, massagesnelheid, type trilling, massagestand (gedeeltelijke, volledige of specifieke massage op één plek) en warmte u als comfortabel en ontspannend ervaart (afbeelding C).

Het selecteren van de functie is eenvoudig:

- Druk in de handmatige stand op de knop **State** om van de ene functie naar de andere over te schakelen. De geselecteerde functie knippert op het display.
- Als er geen functie knippert, is de massagetijd geselecteerd.
- Nadat u een functie hebt geselecteerd, gebruikt u de knoppen **Up / Down** om de verschillende mogelijkheden van die functie te kiezen.

Knoppen op afstandsbediening

1. Selecteer de intensiteitsfunctie door op **State** te drukken totdat Intensity op het display knippert. Druk op de knop **Up / Down** om het intensiteitsniveau van de massage (vibratie-intensiteit) aan te passen.
2. Selecteer de massagesnelheid door op **State** te drukken totdat Speed op het display knippert. Druk op de knop **Up / Down** om het niveau van de massagesnelheid aan te passen.
3. Selecteer het type trilling door op **State** te drukken totdat Fashion op het scherm knippert. Druk op de knop **Up / Down** om het type trilling te kiezen dat u het prettigst vindt.
4. Selecteer de massagestand door op **State** te drukken totdat Mode op het scherm knippert. Druk op de knop **Up / Down**. De verschillende massagestanden worden weergegeven in de afbeelding van het lichaam op het display. U kunt een volledige lichaamsmassage of een massage op een zone / gebied selecteren. De verschillende gebieden lichten op op het display om aan te geven waar u precies gemasseerd wordt.
5. Druk op de knop **State** om de warmtefunctie te selecteren en druk vervolgens op de knop **Up / Down** om deze in te stellen. Deze stand wordt niet beïnvloed door functies of mogelijkheden die u hebt ingesteld voor andere functies.
Als de warmtefunctie is ingeschakeld, verschijnen er lijntjes in de vorm van vlammetjes boven het woord Heat aan de rechterkant van het scherm.
6. Druk op de knop **State** zonder een andere functie te selecteren (er knippert geen functie op het scherm). Druk op **Up / Down** om de massagetijd aan te passen. De massagetijd is instelbaar in intervallen van 5 minuten, met een minimum van 5 minuten en een maximum van 60 minuten.

Technische specificaties

Model	SX-AF81160S
Afmetingen fauteuil (b x h x d)	91 cm x 104 cm x 94,5 cm
Afmetingen zitting	51 x 50 cm
Afmetingen rugleuning	Zonder hoofdsteunen: 56 x 65 cm Met hoofdsteunen: 70 x 65 cm
Lengte wanneer leuning achterover helt	162,5 cm
Hoogte wanneer zitting omhoog is	138 cm
Afstandsbedieningen	1. Massage en warmtetherapie; 2. Liffunctie, verstelbare en opklapbare rugleuning en voetensteun
Gewicht	49 kg
Materiaal	Kunst runderleer (delen die in contact komen met de huid)
Maximaal gebruikersgewicht	136 kg
Spanning massagesysteem	Ingangsspanning: 100-240 V / 50-60 Hz Uitgangsspanning: 12 V/1 A 12 W
Spanning motor voor lift en leuning	Ingangsspanning: 100-240 V / 50-60 Hz Uitgangsspanning: 29 V / 1,8 A 52,2 W
Motoren	5 voor massages + 1 lift-/leuningfunctie
Warmtefunctie	Beschikbaar

Made in China
©2022. Stand Up Seat. Alle rechten voorbehouden.